

“豪雅”鈹雅克雷射
“Hoya ConBio” Nd:YAG Laser

許可證字號：衛署醫器輸字第 011230 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用；產品供應者請正確告知使用者。

『豪雅』鈹雅克雷射，醫師一致認為在美容醫療界是一種突破性改變的療法。532nm 波長對於改善表皮層黑色素斑的效果最好；1064nm 波長則是針對去除真皮層黑色素斑，效果相當顯著。同時，此種雷射療法是最安全、快速並且操作簡易。

適應症：

主要使用在皮膚以及一般醫學的凝結、止血用途上。

體貼、人性化設計：

- 操控容易，使用簡單。
- 手握把有多光點設計，便於調整參數。
- 不使用時，關節臂式可以垂直收藏，安全同時節省空間。
- 使用標準的電壓

禁忌症：

此雷射必須由具備醫師資格者來操作使用，在治療前，病人必須先瞭解術後可能發生病徵風險：

- 前期若已使用標準療法，緊隨後又使用此雷射治療，可能會產生局部的金沈著症，尤其術後，病人又不慎曝曬在陽光底下。
- 術後可能留下傷疤或皮膚表層可能有些凹凸不平
- 術後可能會產生紅斑、浮腫或疼痛
- 術後可能會有色素褪化或黑色素沈著

型號：Medlite C3

規格：

操作介質		Nd:YAG
操作參數		Q-Switch 1064 & Nd:YAG 532
傳送能量	1064nm	0.45 焦耳
	532nm	0.20 焦耳
能量密度	1064nm	12.0 J/cm ² @ 2.0mm spot size
	532nm	5.0 J/cm ² @ 2.0mm spot size
脈衝寬度		5-7 ns
治療速率		Single 1,2,5 and 10 Hz
光點大小	1064 nm	2,3,4,6 & 7 mm
	532 nm	1.5,2,3,4 & 6 mm
冷卻系統		密閉式水循環和空氣熱交換系統
輸入電壓		220 V, Single Phase, 8 Amps or 110V
		Single Phase, 15 Amps
重量		58 公斤
體積		長：72.5 公分、寬：30.5 公分、高：113 公分
光學傳導系統：關節臂		

注意事項：

1. 治療前，請確定醫師、醫護人員以及病人已配戴眼睛防護罩。
2. 不要直視雷射光源，以防眼睛受傷。
3. 在進行治療前，要防止光源反射，造成皮膚表面潛在傷害。
4. 在治療的過程中，雷射的能量可以輕易點燃火源，所以儘可能使用非易燃用品。
5. 隨時注意、小心電壓。

藥商名稱：東寶國際股份有限公司

地 址：台北市復興南路 2 段 293 之 3 號 10 樓

製造廠名：Hoya Photonics, Inc. d/b/a Hoya ConBio

47733 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538-6512, USA