

## 醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

|        |                 |         |            |
|--------|-----------------|---------|------------|
| 產品中文名稱 | “廣特” 探索皮秒家族雷射系統 | 申請醫療器材商 | 科舉顧問股份有限公司 |
|--------|-----------------|---------|------------|

“廣特” 探索皮秒家族雷射系統  
 “Quanta” Discovery Pico Family Laser System  
 衛部醫器輸字第 030388 號  
 批號：  
 製造日期：  
 製造業者名稱：QUANTA SYSTEM S.p.A.  
 製造業者地址：Via Acquedotto, 109, 21017 Samarate (VA), Italy  
 醫療器材商名稱：科舉顧問股份有限公司  
 醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載  
 (市售品須刊載實際地址)



113. 12. 19

市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文說明書。  
 但如市售醫療器材同時放置中、外文說明書者，  
 外文說明書內容須與核定之中文說明書內容相符。

- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書擬稿包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核，



**“廣特” 探索皮秒家族雷射系統**  
**“Quanta” Discovery Pico Family Laser System**

衛部醫器輸字第 030388 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

型號：Discovery Pico Plus、Discovery Pico、Discovery Pico Derm

■ 產品用途

本產品是利用 Nd:YAG 產生的 1064nm 與 532nm 波長與 Ruby 以及脈衝振盪器(OPO)產生的 694nm 波長並具有三種模式(PS、QS、PT)的雷射系統，其適應症如下：

| 雷射源    | 波長     | 雷射模式                     | 適應症                                                                                                   |
|--------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nd:YAG | 1064nm | Picosecond (PS)          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 良性色素性病變</li><li>• 去除刺青</li></ul>                              |
| Nd:YAG | 532nm  | Picosecond (PS)          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 良性色素性病變</li><li>• 去除刺青</li></ul>                              |
| Nd:YAG | 1064nm | Q-switched (QS)          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 血管性病變</li><li>• 良性色素性病變</li><li>• 去除刺青</li><li>• 除毛</li></ul> |
| Nd:YAG | 1064nm | Opti-pulse (OP)          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 血管性病變</li><li>• 良性色素性病變</li><li>• 去除刺青</li><li>• 除毛</li></ul> |
| Nd:YAG | 532nm  | Q-switched (QS)          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 良性色素性病變</li><li>• 去除刺青</li></ul>                              |
| Nd:YAG | 532nm  | Opti-pulse (OP)          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 良性色素性病變</li><li>• 去除刺青</li></ul>                              |
| Nd:YAG | 1064nm | Photo-thermal pulse (PT) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 血管性病變</li><li>• 良性色素性病變</li><li>• 除毛</li></ul>                |
| Ruby   | 694nm  | Photo-thermal pulse (PT) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 良性色素性病變</li><li>• 除毛</li></ul>                                |
| Ruby   | 694nm  | Q-switched (QS)          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 良性色素性病變</li><li>• 去除刺青</li></ul>                              |
| OPO (用 | 694nm  | QS                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 良性色素性病變</li></ul>                                             |

|                   |       |    |                                                                                                |
|-------------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 於 Rosso 握把)       |       |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 去除刺青 (建議用於藍色、深藍色、黑色、綠色)</li> </ul>                    |
| OPO (用於 Rosso 握把) | 694nm | PS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 良性色素性病變</li> <li>• 去除刺青 (建議用於藍色、深藍色、黑色、綠色)</li> </ul> |

## ■ 禁忌症：

- 包括草藥和自然療法之藥物 / 藥品可能導致光敏性。
- 於6個月內曾服用異維A酸（維甲酸）。
- 服用抗凝血藥。
- 曾有乳膠或其他物質藥物過敏史。
- 治療區域具有惡性病變。
- 治療區域具有單純疱疹病毒。
- 懷孕者。
- 具有癰疽患者。
- 受傷的皮膚。
- 高曬黑肌膚。
- 在患者的皮膚疤痕疙瘩有疤痕的更多的風險後的任何皮外傷，其中包括激光治療。
- 主動感染和免疫抑制。活性感染和免疫損害身體的癒合能力。重新安排病人在感染被清除。
- 化學或機械脫毛前6週脫毛激光治療。
- 正在進行的療法或過去基於包含金屬或其他可吸收激光輻射的物質的藥物(例如，用於治療關節炎的金基藥物)進行的療法。

## ■ 警告及注意事項：

### 1. 患者應做好以下準備：

- 雷射設備只能用於完整皮膚的治療
- 應用部件不應靠近外部眼睛周圍
- 治療過程中雷射靠近眼睛時，需採取適當的眼睛保護措施，以保護眼睛。
- 使用本產品期間，發生任何出現出血的情形，請立即停止使用並移開手柄。

請與您的原廠授權之代表人以獲取更多說明。

### 2. 注意事項

治療效果和皮膚損傷的發炎反應，皆取決於皮膚曝露劑量（通量），如能量密度越高，效果越好，但炎症反應也越高。建議以最低的曝露劑量開始治療，漸漸增加至所需之劑量；另外，開始治療前須依據皮膚上的測試區域和患者皮膚類型進行設置。

注意：本產品須由醫師進行操作。



### 3. 併發症和不良反應

在某些患者中觀察到以下輕微併發症：

- 色素過少或過度色素沉著。
- 在治療過程中會出現疼痛，但是在治療過程中通常不需要局部麻醉。
- 治療後可能立即發生紅斑和水腫，但在最壞的情況下數小時或數天後消失。
- 結痂。
- 在治療過程中可能會出現水泡，但是此為自然表皮內的反應，因此通常可以癒合且不會留下疤痕。
- 短暫的色素改變、紋路改變和疤痕形成。
- 紫癍(Purpura)和毛細血管擴張。
- 瘀青、麻木、持續的熱感。
- 出血性氣泡(Hemorrhagic bullae)。
- 黃褐斑(Melasma)。
- 腫脹。
- 淺表血栓形成，血栓性靜脈炎。
- 冷蕁麻疹(Cold urticarial)。
- 瘀點(Petechia)。
- 萎縮。
- 預期外的毛髮生長(Paradoxical hypertrichosis)。
- 免疫反應性。
- 白血球增生(Leukotrichosis)。
- 臨床反應差。

儘管不良反應很少見，請依原廠使用手冊操作，包含術前和術後指導，並使用適當的技術將不良反應最小化。

### ■ 清潔

執行所有清潔程序前，請確認所有設備皆關閉。

**警告：**採取任何措施之前，請務必確認設備已關閉。

#### 1. 清潔外部蓋板

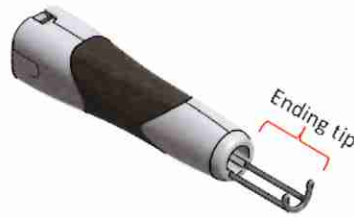
定期使用含有標準清潔劑的布清潔本產品的外部蓋板。避免將清潔劑直接噴在面板上。

**警告：**應格外小心，以免清潔劑滲入本產品內部。

#### 2. 終端清潔程序(與患者接觸)

Tip 清潔階段，必要時可以進行蒸汽滅菌。Tip 清潔時機為每次使用前和初次從保護性包裝中取出時；另外，當器械在治療過程中意外接觸非完整的皮膚，如體液、血液或其他可能感染的物質時，才應進行蒸汽滅菌。

在每個階段之後，操作員必須檢查是否有任何損壞。如果發現損壞，建議更換 Tip。



## 2.1 洗滌劑選擇標準

系統選擇清潔劑時，請遵循以下幾點。

- 清潔劑必須適合清潔鋼製儀器。
- 清潔劑必須與吸頭材料相容（請參見下面的“耐材料性”部分），亦避免使用混合清潔劑。
- 關於濃度和浸泡時間，請遵循洗滌劑製造業者的說明。
- 僅使用新鮮配製的溶液，並且僅使用無菌的低污染(最高 10 germs/ml) 和低內毒素污染的水(最高 0.25 endotoxin units/ml)。請勿使用金屬或鋼絲絨清潔，以免刮傷尖端。

## 2.2 耐材料性

以下非清潔洗滌劑的成分：

- 有機酸、無機酸或氧化酸(最低允許 pH 值為 9.5，建議使用中性或酶促清潔劑)
- 強鹼液(最大允許 pH 值為 5.5)
- 氧化劑(例如：過氧化物)
- 鹵素(例如：氯鹼、碘、溴)
- 芳香鹵代烴

## 2.3 清潔程序

Tip 必須浸入使用溫水(35-40°C, 95-104°F)製備的酶清潔劑(0.5% 濃度的 GIOPLURIZIM 用於後處理驗證)的水溶液中，尖端的所有可能會接觸的區域需用軟毛刷進行刷洗，直到看不見任何碎屑或污垢跡象為止，並浸泡於上述相同的溶液 10 分鐘，必須在約 2 升的冷水量下沖洗兩次，並緩慢移動尖端以使水到達其所有部位，最後用浸有酒精洗滌劑溶液的柔軟無菌乾布擦拭 (GIOALCOL 用於後處理驗證)。

## 2.4 清潔後檢查

檢查所有零件是否有任何可見的殘留雜質、腐蝕或損壞的表面，如果有請與原廠授權之人員聯繫，以更換損壞或腐蝕之零件。

如清潔後發現部件仍有髒汙，請再次依照清潔程序清潔。

福  
縫  
子  
輸  
物  
管

## 2.5 滅菌

將清潔過的零件包裝到一次性使用的滅菌包裝中(一次或兩次)和/或裝入滅菌容器中。

包裝和/或容器必須滿足以下要求：

- 符合 EN ISO/ ANSI AAMI ISO 11607
- 適用於蒸汽滅菌(溫度最高可達 137°C (279°F)，蒸汽滲透性足夠)
- 足夠抵抗機械損壞，並充分保護 handpiece
- 根據製造業者的說明定期進行維護(滅菌容器)

僅使用符合下列所述之滅菌程序，禁止使用不符合下標準的滅菌程序滅菌。

蒸汽滅菌器必須為下：

- 使用 gravity procedure (充分乾燥產品)；
- 符合 EN 13060 或 EN 285；
- 根據 EN ISO 17665, 有效的 IQ/ OQ (commissioning) 和產品特定的性能認證進行驗證；
- 2 大氣壓下，滅菌最高溫度為 134°C (273.2°F) ± 3°C (37.4°F) /10 分鐘(依據當地法規要求可能需要更長的滅菌時間才能使達到滅菌的效果)；
- 滅菌溫度不得低於 131°C (267.8°F)，因為它們無法提供足夠的滅菌能力，而滅菌溫度高於 137°C (278.6°F)可能會損壞設備。

### 警告

- 切勿使用快速滅菌程序。
- 當同時對多台手術器械進行滅菌時，請確認未超過滅菌器的最大負載量。

## 2.6 可重用性

經常清潔會對針尖零件產生些微的影響；然而，這些設備的使用壽命應根據產品磨損和損壞程度確定。

如果 Tip 無磨損且乾淨，可以重複使用。使用者須對每一次使用負責。

請勿使用不乾淨或損壞之 Tip。

所有產品的滅菌須由操作者負責。

注意：有關更換吸頭的訊息，請聯繫您當地的經銷商或 Quanta 系統服務部門。

## 3. 清潔 Handpiece 主體(非接觸患者部件)

清潔外表面使用醫院級消毒劑或戊二醛溶液(Cidex 2%)，切勿將 Handpiece 浸入清潔液中。

Handpiece 鏡片必須保持清潔且無碎屑，以防止鏡片損壞。首先，使用吹氣球去除鏡片表面的任何碎屑，如果還不夠，請使用酒精或異丙醇和軟布仔細清潔鏡頭，並檢查鏡頭確定沒有任何雜物從鏡頭表面掉出。



■ 產品規格：

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 產品名稱       | Discovery PICO Plus /Discovery Pico/Discovery PICO Derm |
| 電源需求       | 3.7kVA, 200-240Vac 50/60Hz                              |
| 操作模式       | 連續                                                      |
| 保險絲        | Circuit breaker                                         |
| Plug types | Schuko / NEMA L6-30                                     |
| 尺寸         | 530(W)*1043(D)*1060(H) mm                               |
| 重量         | 150 kg                                                  |
| 操作溫度       | 10° ~ 30°C                                              |
| 儲存/運輸溫度    | Min. + 5° C / max. 40° C                                |
| 濕度         | 30% - 75%                                               |
| 大氣壓力       | 從 800 hPa 到 1060 hPa                                    |
| 冷卻系統       | 水冷/氣冷                                                   |
| 噪音         | 65 dBA                                                  |
| 導引光束       | < 4mW @635 nm                                           |
| Actuator   | Covered double footswitch                               |
| 電源監控器      | ±10% output energy                                      |

利  
理

19

生  
騎  
品  
藥

113



## Discovery Pico Plus 雷射源規格

| 模式                         | Nd:YAG PS                                                                                                                                                                 |                                     | Nd:YAG QS              |               | Nd:YAG OP                |              | Nd:YAG PT           | Ruby QS                         | Ruby PT      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 波長 (nm)                    | 532                                                                                                                                                                       | 1064                                | 532                    | 1064          | 532                      | 1064         | 1064                | 694                             | 694          |
| 最大能量                       | 300mJ                                                                                                                                                                     | 800mJ                               | 400mJ                  | 800mJ         | 450mJ                    | 1.2J         | 2J                  | 1.2J                            | 2J           |
| 脈衝時間                       | 370ps<br>500ps VP(M)<br>600ps VP(L)                                                                                                                                       | 450ps<br>600ps VP(M)<br>800ps VP(L) | 6ns                    | 6ns           | 6ns + 6ns                | 6ns + 6ns    | 300μs               | 30ns                            | 2ms          |
| 重覆頻率                       | Single,<br>1,2,5,10 Hz                                                                                                                                                    |                                     | Single,<br>1,2,5,10 Hz |               | Single,<br>1,2,4,8,10 Hz |              | Single,<br>1 ~10 Hz | Single,<br>1, 1.5, 2, 2.5, 3 Hz |              |
| 照射面積                       | 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5 mm round;<br>NaturaPeel round 6 mm (只可搭配 1064 PS/QS/OP/PT)<br>2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7 mm² square;<br>8 mm fractional round;<br>fractional 9 mm HC |                                     |                        |               |                          |              |                     |                                 |              |
| 最大通量                       | 7.5 J/cm²                                                                                                                                                                 | 20 J/cm²                            | 10 J/cm²               | 20 J/cm²      | 11.25 J/cm²              | 30 J/cm²     | 50 J/cm²            | 30 J/cm²                        | 50 J/cm²     |
| Divergence<br>(mrad)       | 30                                                                                                                                                                        |                                     |                        |               |                          |              |                     |                                 |              |
| 角膜的最大允許曝露值<br>(MPE) (J/m²) | 0.00063                                                                                                                                                                   | 0.0063                              | 0.00063                | 0.0063        | 0.00053                  | 0.0053       | 0.065               | 0.0011                          | 0.0096       |
| 防護眼鏡需求<br>之光學密度<br>(最小)    | OD ≥6                                                                                                                                                                     | OD ≥6                               | OD ≥6                  | OD ≥6         | OD ≥6                    | OD ≥6        | OD ≥5               | OD ≥7                           | OD ≥5        |
| Goggles                    | 532 M LB9                                                                                                                                                                 | 1064 M LB9                          | 532 R<br>LB7           | 1064<br>R LB8 | 532 R<br>LB7             | 1064<br>R LB | 1064 I<br>LB8       | 694 R<br>LB7                    | 694 D<br>LB5 |
| 標稱眼睛危害<br>距離(NOHD)<br>(m)  | 398                                                                                                                                                                       | 206                                 | 398                    | 230           | 376                      | 217          | 101                 | 572                             | 93           |

Discovery Pico 雷射源規格

| 模式                                      | Nd:YAG PS                                                                                                                                                                             |                                     | Nd:YAG QS            |                      | Nd:YAG OP                |                      | Nd:YAG PT            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 波長 (nm)                                 | 532                                                                                                                                                                                   | 1064                                | 532                  | 1064                 | 532                      | 1064                 | 1064                 |
| 最大能量                                    | 300mJ                                                                                                                                                                                 | 800mJ                               | 400mJ                | 800mJ                | 450mJ                    | 1.2J                 | 2J                   |
| 脈衝時間                                    | 370ps<br>500ps VP(M)<br>600ps VP(L)                                                                                                                                                   | 450ps<br>600ps VP(M)<br>800ps VP(L) | 6ns                  | 6ns                  | 6ns + 6ns                | 6ns + 6ns            | 300µs                |
| 重複頻率                                    | Single,<br>1,2,5,10 Hz                                                                                                                                                                |                                     |                      |                      | Single,<br>1,2,4,8,10 Hz |                      | Single,<br>1 ~10 Hz  |
| 照射面積                                    | 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5 mm round;<br>NaturaPeel round 6 mm (只可搭配 1064 PS/QS/OP/PT)<br>2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7 mm <sup>2</sup> square;<br>8 mm fractional round;<br>fractional 9 mm HC |                                     |                      |                      |                          |                      |                      |
| 最大通量                                    | 7.5 J/cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 | 20 J/cm <sup>2</sup>                | 10 J/cm <sup>2</sup> | 20 J/cm <sup>2</sup> | 11.25 J/cm <sup>2</sup>  | 30 J/cm <sup>2</sup> | 50 J/cm <sup>2</sup> |
| Divergence<br>(mrad)                    | 30                                                                                                                                                                                    |                                     |                      |                      |                          |                      |                      |
| 角膜的最大允許曝露值<br>(MPE) (J/m <sup>2</sup> ) | 0.00063                                                                                                                                                                               | 0.0063                              | 0.00063              | 0.0063               | 0.00053                  | 0.0053               | 0.065                |
| 防護眼鏡需求<br>之光學密度<br>(最小)                 | OD ≥6                                                                                                                                                                                 | OD ≥6                               | OD ≥6                | OD ≥6                | OD ≥6                    | OD ≥6                | OD ≥5                |
| Goggles                                 | 532 M LB9                                                                                                                                                                             | 1064 M LB9                          | 532 R<br>LB7         | 1064<br>R LB8        | 532 R<br>LB7             | 1064<br>R LB         | 1064 I<br>LB8        |
| 標稱眼睛危害<br>距離(NOHD)<br>(m)               | 398                                                                                                                                                                                   | 206                                 | 398                  | 230                  | 376                      | 217                  | 101                  |

# Discovery Pico Derm 雷射源規格

| 模式                                      | Nd:YAG PS                                                                                                                                                                 |                                     | Nd:YAG PT            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 波長 (nm)                                 | 532                                                                                                                                                                       | 1064                                | 1064                 |
| 最大能量                                    | 300mJ                                                                                                                                                                     | 600mJ                               | 2J                   |
| 脈衝時間                                    | 370ps<br>500ps VP(M)<br>600ps VP(L)                                                                                                                                       | 450ps<br>600ps VP(M)<br>800ps VP(L) | 300µs                |
| 重覆頻率                                    | Single,<br>1,2,5,10 Hz                                                                                                                                                    |                                     | Single,<br>1 ~10 Hz  |
| 照射面積                                    | 3, 4.5, 6, 7.5, 9 mm round;<br>NaturaPeel round 6 mm (只可搭配 1064 PS/PT)<br>2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7 mm <sup>2</sup> square;<br>8 mm fractional round;<br>fractional 9 mm HC |                                     |                      |
| 最大通量                                    | 7.5 J/cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     | 15 J/cm <sup>2</sup>                | 50 J/cm <sup>2</sup> |
| Divergence<br>(mrad)                    | 30                                                                                                                                                                        |                                     |                      |
| 角膜的最大允許曝露值<br>(MPE) (J/m <sup>2</sup> ) | 0.00063                                                                                                                                                                   | 0.0063                              | 0.065                |
| 防護眼鏡需求<br>之光學密度<br>(最小)                 | OD ≥6                                                                                                                                                                     | OD ≥6                               | OD ≥5                |
| Goggles                                 | 532 M LB9                                                                                                                                                                 | 1064 M LB9                          | 1064 I LB8           |
| 標稱眼睛危害<br>距離(NOHD)<br>(m)               | 398                                                                                                                                                                       | 206                                 | 101                  |

■ OPTIBEAM II 握把配件：

| 握把名稱       | OPTIBEAM II      |        |
|------------|------------------|--------|
| 光斑形狀       | 光斑尺寸             | 握把識別顏色 |
| 正方形        | 2mm              | 紫色     |
| 正方形        | 3mm              | 紅色     |
| 正方形        | 4mm              | 黃色     |
| 正方形        | 5mm              | 綠色     |
| 正方形        | 7mm              | 橙色     |
| 圓形         | 3mm              | 紅色     |
| 圓形         | 4.5mm            | 黃色     |
| 圓形         | 6mm              | 綠色     |
| 圓形         | 6mm (NaturaPeel) | 綠色     |
| 圓形         | 7.5mm            | 橙色     |
| 圓形         | 9mm              | 紫紅色    |
| 圓形         | 10.5mm           | 藍色     |
| Fractional | 8mm              | 黑色     |
| Fractional | 9mm              | 灰色     |

Rosso 握把規格

| 雷射                                  | OPO (脈衝振盪器)        |           |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 波長(nm)                              | 694                |           |
|                                     | QS mode            | PS mode   |
| 脈衝時間                                | 4 ns               | 500 ps    |
| 重覆頻率(Hz)                            | 達 10               |           |
| 最大能量(mJ)                            | 達 120              | 達 85      |
| 照射面積(mm)                            | Ø 2,3,4            |           |
| 最大通量(J/cm <sup>2</sup> )            | 達3.8               | 達2.7      |
| 尺寸                                  | 229.1 x 46 x 46 mm |           |
| 曝露時間 (s)                            | 4E-9               | 4.5E-10   |
| Divergence (mrad)                   | 9.14E-02           |           |
| 角膜的最大允許曝露值(MPE) (J/m <sup>2</sup> ) | 0.00063            |           |
| 標稱眼睛危害距離 (NOHD)(m)                  | 98                 | 71        |
| 防護眼鏡需求之光學密度 (OD)                    | 5                  | 4.6       |
| 防護眼鏡                                | 694 R LB5          | 694 M LB5 |

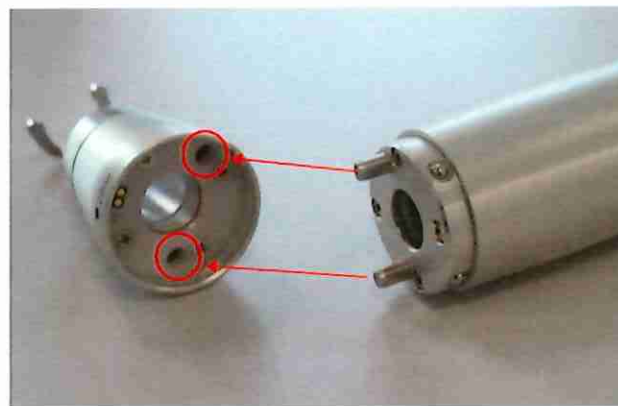


Rosso 握把是一款由波長 532nm 轉換到 694nm 的雷射握把。



握把探頭：可用的照射面積取決於所使用的握把探頭，有 2mm、3mm、4mm。  
欲更換握把探頭，請輕輕拉動握把探頭以將其拆下。

要插入選定的握把探頭，請將兩個插銷對準插入相關孔洞中，如下圖所示：



探頭末端：

為與皮膚接觸的不鏽鋼墊片。

欲更換探頭末端，請小心拉動探頭末端，如下圖所示。



製造業者名稱：QUANTA SYSTEM S.p.A.

製造業者地址：Via Acquedotto, 109, 21017 Samarate (VA), Italy

醫療器材商名稱：科舉顧問股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

## Discovery Pico Plus



## Discovery Pico





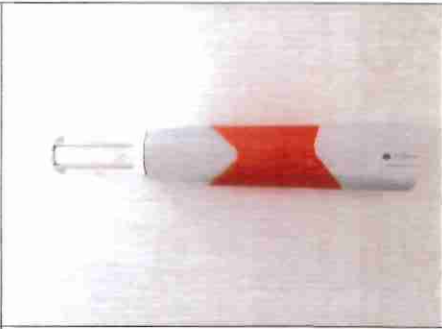
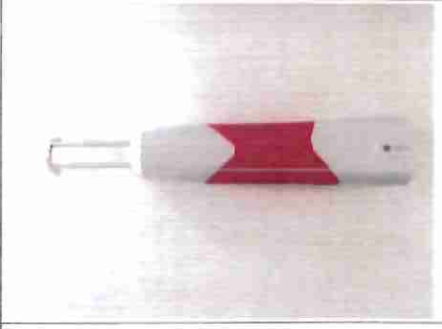
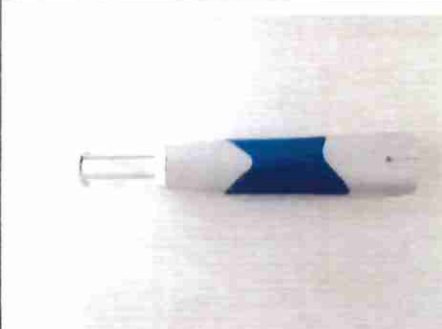
## Discovery Pico Derm



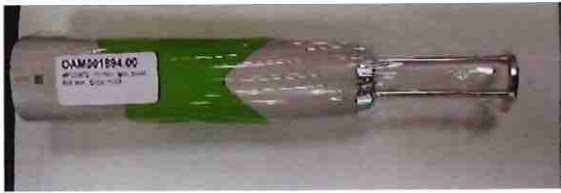
## Discovery Pico

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| The holder            |    |
| The homogenizer block |                                                                                      |
| Fractional            |   |
| Square                |  |
| Round 1064 nm         |  |
| Round 694 nm          |  |

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Round 532 nm  |    |
| Handpiece tip |    |
| Round 3 mm    |   |
| Round 4.5 mm  |  |
| Round 6 mm    |  |

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Round 7.5 mm  |    |
| Round 9 mm    |    |
| Round 10.5 mm |   |
| Square 2*2 mm |  |
| Square 3*3 mm |  |
| Square 4*4 mm |  |

13. 1

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Square 5*5 mm         |    |
| Square 7*7 mm         |    |
| Fractional round 8mm  |    |
| Fractional 9mm HC     |   |
| NaturaPeel round 6 mm |  |
| ROSSO handpiece       |  |



